

## 絵表示の説明:

EN 420: 2003 	<b>一般要件</b> (リスク種別、サイズ、刻印、ラベル等) 使用方法	EN 374: 2003  AKL 12規定薬品中3種類以上30分超	<b>薬品リスク耐性</b> 薬品に対する耐浸透性を示します。3つのアルファベットコードはそれぞれ12種類の規定薬品リスト中の薬品を示し、いずれも30分以上の破過時間が確認されていることを表しています。 破過レベル1-6 (10~480分) A:メタノール K:水酸化ナトリウム L:硫酸
EN 388: 2003  A B C D	<b>力学リスク耐性</b> A:耐摩耗性(0-4) B:耐切削性(0-5) C:耐引裂性(0-4) D:耐突刺性(0-4)	EN 374: 2003 	<b>低レベル・薬品リスク耐性</b> 透過試験合格品のうち、規定12薬品のうち3種類以上について30分を超える破過時間の得られない撥水製品をこのように図で表しています
EN 407: 2004  A B C D E F	<b>高温リスク耐性</b> A:引火性(0-4) B:接触熱耐性(0-4) C:対流熱耐性(0-4) D:放射熱耐性(0-4) E:熔融金属耐性(少量)(0-4) F:熔融金属耐性(多量)(0-4)	EN 374: 2003 	<b>微生物リスク耐性</b> 透過:AQL品質管理基準検査に基づく気体/液体浸入試験の実施。 レベル3:AQL <0.65 / G1
EN 511: 2006  A B C	<b>低温リスク耐性</b> A:対流低温耐性(0-4) B:接触低温耐性(0-4) C:水分不浸透性(0-1)		

## C. 使用方法

手袋は、各商品に記載された使用法マークに従ってご使用ください。薬品を扱う作業に際しては、使用する手袋に耐薬品を示す絵文字が印字されていること、また実際に使われる薬品に適合する商品であることをご確認ください。薬品透過レベルについての詳細情報は [www.atg-glovesolutions.com](http://www.atg-glovesolutions.com) をご参照ください。

この情報は実際の作業における保護時間や、薬品の単独及び混合使用における差異を反映するものではありません。耐薬品性能は、実験室において手袋のてのひら部分の素材に対する各化学薬品の単独付着についてそれぞれ測定されたものです。複数の薬品を混合使用した場合には結果が異なる可能性があります。

手袋製品を鋸歯状端や刃、裸火からの保護目的で使用しないでください。高温リスク下において使用するには、使用される手袋がE407に適合しており、また使用される条件下で試験済であることを確認してください。作動中の機械類または機械部品等に巻き込まれるリスクがある場合には使用しないでください。

使用前に手袋に破損及び不完全部分がないことを確認し、破損や著しい汚染、何らかの物質付着のある製品(内側を含む)は使用しないでください。そのような製品を使用した場合、皮膚の炎症や感染を引き起こし皮膚炎にいたる場合があります。そのような場合には社内の医療専門家や皮膚科医に相談してください。使用後は乾いた布で隅々まで拭い、手袋から汚染物質を取り除いてください。製品を再使用を想定している場合には、内部ライナーが乾きやすい状態で保管してください。

## D. 成分・アレルギー

製品によってはアレルギー誘因物質を含有し、体質により炎症や接触性アレルギー反応を起こす場合があります。アレルギー反応を生じた場合には速やかに専門家に相談してください。

**警告:** 当社の製品にはアレルギーとなり得る天然ゴム(ラテックス)を含むものがあります。詳細についてはATG®技術部門(TECHNICAL DEPARTMENT)までお問い合わせください。

## E. 手入れ方法

製品は包装された状態で高温多湿を避けて保管してください。直射日光、高温、火気、オゾン源を避けて保存してください。購入日から3年以内にご使用ください。

当社製品は水温40°Cにて一般洗剤を使用しての3回までの洗浄が可能です。洗濯後は表示された性能を発揮しない場合があります。洗濯前と同様の性能を発揮しない場合、その洗濯の方法が当社の提供する使用方法に従ったものであってもATG®社では一切の責任を負いかねます。

使用後の手袋は感染源あるいは危険物質により汚染されている場合があります。管轄監督局や自治体の法律に従って処分し、埋め立てや焼却は管理された条件下で実施してください。適切な手袋タイプの選択、使用法、性能に関するご質問及びCE適合声明書面のご確認についてはATG®社(メール: [INFO@ATG-GLOVESOLUTIONS.COM](mailto:INFO@ATG-GLOVESOLUTIONS.COM) ファクス (+94)-11-225-3887) または販売元にお問い合わせください。

## F. 製品保証／損害賠償責任の制限

ATG®社では認可された販売業者に対する供給日の時点において本製品がATG®基本仕様を満たしていることを保証します。法律の定める範囲内において、本保証は 特定目的への適合保証を含むすべての保証に代えるものとします。ATG®社の責任範囲は当該製品の購入代金の範囲内に限定されません。本製品の購入者及び使用者はこの保証の制限を受諾したものと見なされ、いかなる口頭または書面による合意によってもこの保証の制限を変更することはできません。